

# Gebrauchsanleitung zu Ihrem **Fitform-Vario-Sessel**

## User manual for your **Fitform-Vario-chair**



Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen!



Your well-being, our passion!

**fitFORM**  
member of Wellco®

# Inhalt



1.	Vorwort	4
2.	Wichtige allgemeine Informationen	5
2.1	Fitform	5
2.2	Allgemeine Instruktionen u. Warnhinweise	5
3.	Gebrauchsanleitung zum Fitform-Sessel	10
3.1	Mit Kabel-Handbedienung	10
3.2.	Mit integrierte Tasten-Steuerung	15
4.	Gebrauchsanleitung zur verstellbaren Lendenstütze u. Kopfstütze	16
5.	Gebrauchsanleitung zu diversen Optionen u. Zubehör	17
5.1	Akku	17
5.2	APPR-Sitzsystem	18
5.3	Arthrodese-Sitzfläche	19
5.4	Drehscheibe	19
5.5	Elektrisch aufblasbare Lendenstütze	20
5.6	Hemiplegie-Armlehne	21
5.7	Infrarot-Handbedienung	21
5.8	Kyphose-Rückenlehne einstellbar	22
5.9	Memory-Funktion	23
5.10	Mobility-Kit Rollensystem	24
5.11	RCPM-Sitzsystem	25
5.12	Transparente Arbeitsplatte	26
5.13	Verstellbarer Arbeitstisch	26
5.14	Heizung in Sitz und Rücken	27
5.15	Laufrollensystem	28
5.16	Abklappbares Seitenteil	29
6.	Häufig gestellte Fragen	30

## Ihr Sitzspezialist:

Möbelhandel Narjes  
Aufstehsessel - Pflegesessel - Rehasessel  
Kaisersbusch 1  
D-42781 Haan  
Telefon: 02129 - 1287

Internet: [www.narjes.de](http://www.narjes.de)  
Internet: [www.pflege-sessel.de](http://www.pflege-sessel.de)  
E-Mail: [info@narjes.de](mailto:info@narjes.de)

# 1. Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Fitform-Sessels. Sie haben die richtige Wahl getroffen! Sie haben sich für einen optimalen Sitzkomfort und einer hervorragenden Produktqualität entschieden.

Diese Gebrauchsanleitung wurde speziell für die Benutzer eines Fitform-Sessels erstellt. Ein Benutzer kann, neben der Person die diesen Sessel als Hilfsmittel und Sitzlösung gebraucht auch eine Person sein, die regelmäßige Berührungspunkte mit dem Sessel hat. Beispielsweise Therapeuten und Pflegekräfte.

Lesen Sie dieses Heft daher vor Inbetriebnahme sorgfältig und aufmerksam durch. Neben den allgemeinen Instruktionen u. Warnhinweisen und der allgemeinen Gebrauchsanleitung des Sessels, finden Sie Anleitungen zu zahlreichen Optionen und Zubehör.

Wir wünschen Ihnen viel Sitzvergnügen!

# 2. Wichtige allgemeine Informationen

## 2.1. Fitform

Fitform ist eine niederländische Qualitäts-Marke und bekannt für ansprechende, funktionelle Sitzlösungen, basierend auf den aktuellsten ergonomischen Erkenntnissen. Fitform-Produkte werden nach den höchsten Qualitätsnormen hergestellt, unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und stellen unter Beweis, dass ansprechendes Design, Funktionalität, Langlebigkeit und vor allem außergewöhnlich gute Sitzqualität sich ausgezeichnet vereinen lassen.

Fitform ist eine Marke der Wellco International BV.

Wellco International BV  
Randweg 17  
NL-5683 CL Best  
Niederlande

## 2.2. Allgemeine Instruktionen u. Warnhinweise

Ihr neuer Fitform-Sessel wurde umfangreich und sorgfältig von Wellco geprüft, und wird gebrauchsbereit geliefert. Ihr Lieferant sollte bei der ersten Nutzung des Sessels anwesend sein. Er wurde geschult den Sessel nochmals zu kontrollieren, Sie kompetent in die Funktionen einzuweisen und falls notwendig direkt mit Wellco International BV Kontakt aufzunehmen.



**Wir empfehlen Ihnen auch diesen Teil der Anleitung sorgfältig zu lesen, da er sich mit Sicherheit und möglichen Gefahren des Sessels beschäftigt. Beachten Sie diese Instruktionen unbedingt während der gesamten Nutzungsdauer des Sessels.**





### **Mechanik**

**Achtung:** Dieser Sessel ist mit einer sehr kraftvollen motorischen Mechanik ausgerüstet. Bitte kontrollieren Sie vor jeder Verstellung der Sitzposition, dass keine Fremdteile zwischen die beweglichen Teile der Mechanik geraten. (Das gilt im Besonderen wenn Kinder oder Haustiere anwesend sind!)



### **Platzierung des Sessels**

- Jeder Sessel ist so aufzustellen, dass alle zugehörigen Funktionen ohne Einschränkungen ausgeführt werden können.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine „Stolperfalle“ darstellt.
- Um eine absolute Standfestigkeit des Sessels zu gewährleisten, muss dieser auf einem festen und geraden (horizontalen) Untergrund stehen.
- Es muss jederzeit möglich sein, den Sessel vom Stromnetz zu trennen. Sorgen Sie daher dafür, dass der Netzstecker leicht aus der Steckdose entfernt werden kann.
- Nutzen Sie den Sessel niemals auf einem rutschigen oder instabilen Untergrund (z.B. Sand).
- Der Fitform-Sessel darf nur innerhalb des Hauses benutzt werden.



### **Gebrauch**

- Fitform-Sessel sind für die gleichzeitige Nutzung nur einer Person konzipiert.
- Das maximale Gewicht dieser Person darf 150 kg nicht übersteigen. (Standard)
- Benutzen Sie den Sessel keinesfalls mit einer Belastung über 150 kg. (Standard)
- Belasten Sie den Antrieb nicht unnötig durch unkontrolliertes Drücken der Handbedienungstasten
- Lassen Sie den Sessel nicht unbeobachtet in der Nähe von Kindern.
- Der Sessel-Nutzer darf keine Änderungen (Modifikationen) am Sessel vornehmen.
- Es ist untersagt auf der Sitzfläche oder der Fußstütze zu stehen.
- Es ist untersagt auf einer anderen Stelle des Sessels außer der Sitzfläche zu sitzen (z.B. Armlehnen / Fußstütze / Rückenlehne)
- Wellco haftet nicht für Schäden die durch einem zweckentfremdeten Gebrauch bzw. einer unsachgemäßen Benutzung des Sessels entstehen.
- Auch wenn der Fitform-Sessel ausführlich getestet wurde, ist ein Einfluss auf elektromagnetische Felder (z.B. Alarm-Anlagen) nicht vollkommen auszuschließen.
- Die Wirkungsweise des Fitform-Sessels kann negativ durch starke elektromagnetische Felder (z.B. Mobil-Telefone, elektrische Generatoren usw.) beeinflusst werden. Sollte der Sessel auf derartige Strahlungsquellen z.B. mit ungewöhnlichen Geräuschen reagieren, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und beseitigen Sie die Strahlungsquelle.



### **Transport**

Ein Transport des Sessels nach der ersten Ablieferung durch ihren Lieferanten ist nicht vorgesehen. Sollten Sie umziehen in eine andere Wohnung, sollte der Sessel nicht wie die anderen Möbelstücke behandelt werden. Achten Sie darauf, dass der Sessel während des Transportes nicht verrutschen kann. Wellco empfiehlt den Sessel leicht in Aufsteheposition zu bringen (Abstand der Füße ca. 2 cm vom Boden). Schützen Sie den Sessel vor extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und anderer negativer Witterungseinflüsse. Gegen Staub und Schmutz ist es sinnvoll den Sessel mit einer Hülle oder Stoff zu bedecken.

Der Fitform-Sessel muss unter den folgenden Bedingungen transportiert, benutzt und gelagert werden:

Umgebungstemperatur:	10°C – 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30% - 75%
Luftdruck:	70kPA – 106kPA



### **Störungen**

Im Störfall ist in erster Linie immer zu kontrollieren, ob der Stecker in der Steckdose steckt oder die Tastatursperre aktiviert wurde. In allen anderen Störfällen raten wir Ihnen dazu, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen und sich umgehend mit Ihrem Lieferanten in Verbindung zu setzen. Dieser wird versuchen die Störung schnellstmöglich zu beheben. Wellco haftet nicht für Schäden die durch einem zweckentfremdeten Gebrauch bzw. einer unsachgemäßen Benutzung des Sessels entstehen. In der Gebrauchsanleitung finden Sie die Verstellmöglichkeiten des Sessels.



## Pflege

Um sicherzustellen, dass die in der Mechanik befindlichen Schmiermittel nicht austrocknen, empfiehlt es sich, die beweglichen / drehenden Teile der Mechanik einmal jährlich mit Sprühdosenöl (vorzugsweise mit Teflonpartikelchen) einzuspritzen. Entsprechende Öle sind im Fachhandel sowie bei Wellco erhältlich.

Wenn die Mechanik beim Verstellen der Positionen Geräusche macht, liegt es nahe, dass infolge hoher Umgebungstemperaturen die Schmiermittel ausgetrocknet sind. Wir raten Ihnen dazu die Oben genannten Schritte durchzuführen. Ihr Lieferant wird Ihnen zusätzlich für weitere Ratschläge und Informationen zur Verfügung stehen.

Nach einem Zeitraum von 5 Jahren raten wir Ihnen, den Sessel jährlich auf Sicherheit und Zustand zu kontrollieren.

Es ist nicht erlaubt eigene Reparaturen an einem Fitform-Sessel durchzuführen bzw. einen nicht durch Wellco autorisierten Händler / Techniker mit der Reparatur zu betrauen. In diesem Fall entfallen umgehend sämtliche Garantieleistungen der Wellco International BV sowie die Produkthaftung.

## Technische Spezifikation







Der Fitform-Sessel der Serie 500 (Vario) wurde getestet und zertifiziert nach folgendem Standard:

### EN 12182 - Oktober 1999:

Technische Hilfsmittel für Personen mit Handicap – allgemeine Richtlinien und Test-Methoden.

Dieses Produkt, die zugehörige Dokumentation (wie auch die Gebrauchsanleitung) sowie die zugehörigen Prozesse / Prozeduren bei Wellco International BV erfüllen die Richtlinie 93/42/EEC für medizinische Hilfsmittel. In Folge hiervon ist das Produkt CE gekennzeichnet.

## Identifikations-Kennzeichnung

	Well co International B.V.		<b>Waarschuwingen/Warnungen/Warnings</b>  1. Alleen op vaste en vlakke ondergrond gebruiken Nur auf festem und ebenem Untergrund verwenden Only for use on solid and horizontal grounds  2. Niet voor vervoer van personen Nicht zum transport von Personen verwenden Do not use for transportation of persons  3. Lees de gebruiksaanwijzing Bedienungsanweisung lesen Read the manual
	Randweg 17  5683 CL Best  The Netherlands		
Product Type/Typ	Vario		
Datum/Date	Mm/yyyy		
Serie Nummer/Serialnumber	Xxxxxxx		
Max. Gewicht/Max. weight	150 kg		
Nom. spanning/Nennspannung/Rated supply voltage:	230 V		
Nom. vermogen/Nennaufnahme/Rated input power:	55 VA		
Max. inschakelduur/Max. Einschaltdauer/Duty cycle:	15%		
Max. Inschakelduur/Max. Einschaltdauer/Duty cycle:	5 Minuten/Min.		
 50/60 Hz			IP20

### 3. Gebrauchsanleitung zum Fitform-Sessel mit elektrischer Verstellung



Die Tasten der Kabel-Handbedienung sind sehr berührungsempfindlich. Besonders beim Einstecken in die Seitentasche sollten Sie darauf achten, damit eine Dauerfunktion vermieden wird.

#### 3.1. Kabel-Handbedienung

##### Handbedienung HB1 (M1)

###### A. Zur Aufstehposition

Mit der roten Taste A fährt der Sessel langsam in die Aufstehposition. Die Aufstehbewegung hebt Sie gleichmäßig aus dem Stuhl hervor.

###### B. Zurück zur Sitzposition bzw zur Relaxposition

Mit der roten Taste B fahren Sie zurück in die Sitzposition. Wird die Taste länger betätigt, fährt die Fußstütze aus und fährt der Sessel automatisch weiter in die Relax-Position.

###### Schlüssel-Taste

Falls Ihr Sessel über eine sog. Tastatursperre verfügt, befindet sich eine weitere - mit einem Schlüsselsymbol versehene - Taste auf der Handbedienung. Wenn Sie diese Taste drücken bis die LED-Lampe am oberen Ende der Handbedienung blinkt (ca. 10 Sekunden), sind sämtliche Funktionen des Sessels gesperrt. (Tastatursperre)

Bei erneutem Drücken der Sperrtaste bis zum Erlöschen des Blinkens (ca. 10 Sekunden), ist die Sperre der Funktionen wieder aufgehoben. Diese Sicherheits-Funktion ist u. A. empfehlenswert bei der Anwesenheit kleiner Kinder.



##### Handbedienung HB2 (M2)

###### A. Fußstütze einfahren

Mit der gelben Taste A fährt die Fußstütze ein.

###### B. Fußstütze ausfahren

Mit der gelben Taste B fährt die Fußstütze aus. Wenn Sie diese höher als in die äußerste Stellung positionieren möchten, ist das mit der roten Taste D möglich. Dabei werden gleichzeitig die Rückenlehne und die Sitzfläche etwas nach Hinten gekippt, so dass eine zusätzliche Belastung Ihres Rückens vermieden wird. Wenn sich der Sessel in einer Aufstehposition befindet, kann die Fußstütze nicht betätigt werden. Lässt sich die Fußstütze nicht ausfahren, so ist zu prüfen ob der Sessel auf dem Boden aufsteht (Taste D).

###### C. Zur Sitzposition bzw. zur Aufstehposition

Mit der roten Taste C fährt der Sessel von der Relax-Position wieder in die Sitzposition. Wird die Taste länger betätigt, fährt der Sessel weiter in die Aufstehposition und die evtl. hervorstehende Fußstütze wird automatisch eingefahren. Mit dieser Taste werden Sie gleichmäßig aus dem Sessel hochgehoben.

###### D. Zur Sitzposition bzw. zur Relax-Position

Mit der roten Taste D fährt der Sessel wieder zurück in die Sitzposition. Wird die Taste länger betätigt, fährt der Sessel automatisch weiter in die Relax-Position. Mit anschließendem drücken der Taste B fährt die Fußstütze heraus und Sie erreichen die optimale „Wohlfühl-Position“ (Relax-Position).

###### Schlüssel-Taste

Falls Ihr Sessel über eine sog. Tastatursperre verfügt, befindet sich eine weitere - mit einem Schlüsselsymbol versehene - Taste auf der Handbedienung. Wenn Sie diese Taste drücken bis die LED-Lampe am oberen Ende der Handbedienung blinkt (ca. 10 Sekunden), sind sämtliche Funktionen des Sessels gesperrt. (Tastatursperre) Bei erneutem Drücken der Sperrtaste bis zum Erlöschen des Blinkens (ca. 10 Sekunden), ist die Sperre der Funktionen wieder aufgehoben. Diese Sicherheits-Funktion ist u. A. empfehlenswert bei der Anwesenheit kleiner Kinder.



## Handbedienung HB3 (M3)

### A. Fußstütze einfahren

Mit der gelben Taste A fährt die Fußstütze ein.

### B. Fußstütze ausfahren

Mit der gelben Taste B fährt die Fußstütze aus. Wenn Sie diese höher als in die äußerste Stellung positionieren möchten, ist das mit der roten Taste D möglich. Dabei werden gleichzeitig die Rückenlehne und die Sitzfläche etwas nach Hinten gekippt, so dass eine zusätzliche Belastung Ihres Rückens vermieden wird. Wenn sich der Sessel in einer Aufstehposition befindet, kann die Fußstütze nicht betätigt werden. Lässt sich die Fußstütze nicht ausfahren, so ist zu prüfen ob der Sessel auf dem Boden aufsteht (Taste D).

### C. Zur Sitzposition bzw. zur Aufstehposition

Mit der roten Taste C fährt der Sessel von der Relax-Position wieder in die Sitzposition. Wird die Taste länger betätigt, fährt der Sessel weiter in die Aufstehposition und die evtl. hervorstehende Fußstütze wird automatisch eingefahren. Mit dieser Taste werden Sie gleichmäßig aus dem Sessel hochgehoben.

### D. Zur Sitzposition bzw. zur Relax-Position

Mit der roten Taste D fährt der Sessel wieder zurück in die Sitzposition. Wird die Taste länger betätigt, fährt der Sessel automatisch weiter in die Relax-Position. Mit anschließendem Drücken der Taste B fährt die Fußstütze heraus und Sie erreichen die optimale „Wohlfühl-Position“ (Relax-Position).

### E. Rückenlehne nach Vorne

Mit der blauen Taste E fährt die Rückenlehne nach Vorne – Ihre Haltung wird „gerader“.

### F. Rückenlehne nach Hinten

Die blaue Taste F hat einen doppelten Zweck:

1. In der Sitzposition können Sie den gewünschten Sitzwinkel persönlich einstellen. Achten Sie allerdings darauf, dass die Rückenlehne nicht zu weit nach Hinten verstellt wird, sonst besteht die Gefahr aus dem Sitz zu rutschen.
2. Wenn Sie die Relax-Position erreichen, können Sie die Rückenlehne weiter nach Hinten bewegen, um eine Schlafposition einzunehmen.



## Schlüssel-Taste

Falls Ihr Sessel über eine sog. Tastatursperre verfügt, befindet sich eine weitere - mit einem Schlüsselsymbol versehene - Taste auf der Handbedienung. Wenn Sie diese Taste drücken bis die LED-Lampe am oberen Ende der Handbedienung blinkt (ca. 10 Sekunden), sind sämtliche Funktionen des Sessels gesperrt. (Tastatursperre)

Bei erneutem Drücken der Sperrtaste bis zum Erlöschen des Blinkens (ca. 10 Sekunden), ist die Sperre der Funktionen wieder aufgehoben. Diese Sicherheits-Funktion ist u. A. empfehlenswert bei der Anwesenheit kleiner Kinder.

## Handbedienung HB4 (M4)

### A. Fußstütze einfahren

Mit der gelben Taste A fährt die Fußstütze ein.

### B. Fußstütze ausfahren

Mit der gelben Taste B fährt die Fußstütze aus. Wenn Sie diese höher als in die äußerste Stellung positionieren möchten, ist das mit der roten Taste D möglich. Dabei werden gleichzeitig die Rückenlehne und die Sitzfläche etwas nach Hinten gekippt, so dass eine zusätzliche Belastung Ihres Rückens vermieden wird.

### C. Zur Sitzposition

Mit der roten Taste C fährt der Sessel von der Relax-Position wieder in die Sitzposition.

### D. Zur Relax-Position

Mit der roten Taste D fährt der Sessel in die Relax-Position. Mit anschließendem Drücken der Taste B fährt die Fußstütze heraus und Sie erreichen die optimale „Wohlfühl-Position“ (Relax-Position).

## Schlüssel-Taste

Falls Ihr Sessel über eine sog. Tastatursperre verfügt, befindet sich eine weitere - mit einem Schlüsselsymbol versehene - Taste auf der Handbedienung. Wenn Sie diese Taste drücken bis die LED-Lampe am oberen Ende der Handbedienung blinkt (ca. 10 Sekunden), sind sämtliche Funktionen des Sessels gesperrt. (Tastatursperre)

Bei erneutem Drücken der Sperrtaste bis zum Erlöschen des Blinkens (ca. 10 Sekunden), ist die Sperre der Funktionen wieder aufgehoben. Diese Sicherheits-Funktion ist u. A. empfehlenswert bei der Anwesenheit kleiner Kinder.



## Handbedienung HB5 (M5)

### A. Fußstütze einfahren

Mit der gelben Taste A fährt die Fußstütze ein.

### B. Fußstütze ausfahren

Mit der gelben Taste B fährt die Fußstütze aus. Wenn Sie diese höher als in die äußerste Stellung positionieren möchten, ist das mit der roten Taste D möglich. Dabei werden gleichzeitig die Rückenlehne und die Sitzfläche etwas nach Hinten gekippt, so dass eine zusätzliche Belastung Ihres Rückens vermieden wird.

### C. Zur Sitzposition

Mit der roten Taste C fährt der Sessel von der Relax-Position wieder in die Sitzposition.

### D. Zur Relax-Position

Mit der roten Taste D fährt der Sessel in die Relax-Position. Mit anschließendem Drücken der Taste B fährt die Fußstütze heraus und Sie erreichen die optimale „Wohlfühl-Position“ (Relax-Position).

### E. Rückenlehne nach Vorne

Mit der blauen Taste E fährt die Rückenlehne nach Vorne – Ihre Haltung wird „gerader“.

### F. Rückenlehne nach Hinten

Die blaue Taste F hat einen doppelten Zweck:

1. In der Sitzposition können Sie den gewünschten Sitzwinkel persönlich einstellen. Achten Sie allerdings darauf, dass die Rückenlehne nicht zu weit nach Hinten verstellt wird, sonst besteht die Gefahr aus dem Sitz zu rutschen.
2. Wenn Sie die Relax-Position erreichen, können Sie die Rückenlehne weiter nach Hinten bewegen, um eine Schlafposition einzunehmen.

### Schlüssel-Taste

Falls Ihr Sessel über eine sog. Tastatursperre verfügt, befindet sich eine weitere - mit einem Schlüsselssymbol versehene - Taste auf der Handbedienung. Wenn Sie diese Taste drücken bis die LED-Lampe am oberen Ende der Handbedienung blinkt (ca. 10 Sekunden), sind sämtliche Funktionen des Sessels gesperrt. (Tastatursperre)  
Bei erneutem Drücken der Sperrtaste bis zum Erlöschen des Blinkens (ca. 10 Sekunden), ist die Sperre der Funktionen wieder aufgehoben. Diese Sicherheits-Funktion ist u. A. empfehlenswert bei der Anwesenheit kleiner Kinder.



## 3.2. Mit integrierte Tasten-Steuerung

Es ist möglich, dass Ihr Fitform-Sessel nicht mit einer separaten Handbedienung sondern mit einer integrierten Tasten-Steuerung ausgestattet ist. Vergleichen Sie ihren Sessel mit den abgebildeten Fotos und lesen Sie bitte die dazugehörige Anleitung:

### 2-Tasten-Bedienung an der Innenseite der Armlehne

Eine Taste ermöglicht hierbei die Kippbewegung nach Hinten bis in die Liegeposition.

Die andere Taste ermöglicht die Kippbewegung nach Vorne bis in die Aufstehposition. Häufig wird diese Taste mit einer Aufsteh-taste kombiniert.



### Aufsteh-taste / Kippschalter unter der Vorderseite der Armlehne

Eine Seite des Kippschalters ermöglicht die Kippbewegung nach Hinten bis in die Liegeposition.

Die andere Seite des Kippschalters ermöglicht die Kippbewegung nach Vorne bis in die Aufstehposition.

Der Kippschalter wird grundsätzlich nur in Kombination mit anderen Steuerungen eingebaut. Zur optimalen Nutzung des Sessels und eingehend auf Ihre eigene natürliche Sitz-, Relax- und Aufstehbewegung,

empfehlen wir für das bequeme Aufstehen- bzw. Einsteigen den Kippschalter zu nutzen.

Für das Ausruhen (Kippverstellung nach Hinten und Fußbank ausfahren) empfehlen wir hingegen eine der anderen eingebauten Steuerungen.





## 4. Gebrauchsanleitung zur verstellbaren Lendenstütze u. Kopfstütze

### Verstellbare und aufblasbare Lendenstütze

Für eine optimale Unterstützung des unteren Rückenbereichs (Lendenbereich) finden Sie auf der Rückseite der Rückenlehne einen Reißverschluss. Hinter diesem Reißverschluss befindet sich ein Drehknopf sowie ein kleiner Blasebalg (Handpumpe). Durch das Lösen des Drehknopfes kann dieser samt der Lendenstütze nach Oben bzw. Unten verschoben werden. Durch Betätigung des Blasebalgs wird Luft in die Lendenstütze eingefüllt – Sie erhalten eine stärkere Rückenunterstützung. Zur Entleerung der Lendenstütze betätigen Sie den Knopf am Blasebalg.

**Achtung:** eine Höhenverstellung der Lendenstütze ist nur im luftleerem Zustand möglich

### Verstellbare Kopfstütze (*Top Swing*)

Falls vorhanden, können Sie die gewünschte Kopf-Unterstützung einstellen, indem Sie die Rückenlehne etwa 30 cm von der Oberkante aus nach Vorne oder nach Hinten biegen. Das zugehörige Gelenk wurde bewusst schwergängig konstruiert, um auch bei Belastung eine optimale und sichere Unterstützung des Kopfes zu gewährleisten.



## 5. Gebrauchsanleitung zu diversen Optionen u. Zubehör

### 5.1 Akku

Dank des Akkus haben Sie kein störendes Netzkabel in Ihrem Zimmer. Um sicherzustellen, dass Ihr Fitform-Sessel mit Akku zu jeder Zeit betriebsbereit bleibt, ist es wichtig die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

#### Rechtzeitiges Aufladen des Akku-Systems

Wenn während der Sesselnutzung ein **hoher Signalton in kurzen Abständen ertönt**, sollte das Akku-System mindestens 24 Stunden aufgeladen werden. (Hinweis: es besteht keine Gefahr der Überladung in diesem System)

**Wenn Sie den Piepton kontinuierlich im Abstand einiger Sekunden hören, so sind die Batterien tief entladen und müssen umgehend mindestens 36 Stunden aufgeladen werden um bleibende Schäden an den Batterien zu vermeiden.**

Wenn der Sessel mit einem Akku-System ausgerüstet ist, stoppt dieser nicht automatisch in der Neutral-Position.

#### Sicherheitsfunktion der Fußstütze

Die Fußstütze fährt automatisch ein wenn eine Aufstehposition von min. 5 cm erreicht wird. Oberhalb dieser 5 cm kann die Fußstütze nicht mehr ausgefahren werden. (Sicherheitsfunktion)

#### Aufladen des Akku-Systems

- Öffnen Sie den Reißverschluss an der Rückseite des Sessels (Rückseite der Rückenlehne).
- Nehmen Sie die Anschluß-Buchse, die mit Klettband an der Metallplatte befestigt ist, heraus.
- Schließen Sie das (lose mitgelieferte) Netzkabel an.
- Das Akku-System wird nun geladen. Während des Ladens können Sie den Sessel uneingeschränkt benutzen.



## 5.2 APPR-Sitzsystem

Prüfen Sie ob die lose Handpumpe – zugehörig zum eingebauten ROHO-Sitzkissen – dem Sessel beiliegt. Mit dieser Handpumpe können Sie die Luftkammern in der Rückenlehne sowie das ROHO-Sitzkissen aufpumpen.

### Einstellung der Sitzfläche

An der Vorderseite des Sessels am Übergang der Sitzfläche zur Fußstütze (1) finden Sie das Ventil zum Aufpumpen des ROHO-Sitzkissens. An der Unterseite der Sitzfläche (2) finden Sie Einstellknöpfe zur Regelung der Luftmenge, die in die Kammern des Sitzkissens – unabhängig von einander – eingefüllt werden kann.



In der beigelegten Anleitung von ROHO werden die Funktion und Handhabung ausführlich beschrieben.



### Einstellung der Rückenlehne

In der Rückenlehne sorgen mehrere aufblasbare Luftkammern für eine optimale und individuelle Unterstützung. Hinter dem Reißverschluss an der Rückseite der Rückenlehne befinden sich 4 Luftschläuche mit Verschlüssen (siehe Abb.) in unterschiedlichen Fabrtönen.

- **Grün/gelb gestreift Ventil** für die Lendenstütze
- **Blau Ventil** für die seitliche Unterstützung
- **Braun Ventil** für den obersten Rückenbereich
- **Schwarz Ventil** für die Luftkammer der Vorderseite  
Hiermit können die Effekte der anderen Luftkammern etwas kompensiert werden, so dass ein weicheres und komfortableres Gefühl entsteht und die Luftströmungen kontinuierlich in Bewegung sind.



Diese Angaben finden Sie ebenfalls auf der mitgelieferten Farbkarte! Auch wenn die Luft nicht sehr schnell aus den Luftkammern entweicht, ist es trotzdem wichtig dieses regelmäßig zu kontrollieren und dabei zu prüfen, ob die Einstellungen nach wie vor für Sie korrekt sind.

## 5.3 Arthrodese-Sitzfläche

Dank der geteilten Arthrodese-Sitzfläche können Sie eine Sitzhaltung einnehmen, bei der das Knie nur wenig oder nicht gebeugt werden muss.

### Einstellung der Arthrodese-Klappen

Die Neigung der Arthrodese-Klappen ist mit Hilfe der Bolzen, die sich am Sitzrahmen befinden, auf beiden Seiten nach Unten einstellbar. Die maximale Einstellmöglichkeit beträgt hier 8 cm nach Unten.



### Ingebrauchnahme des Fitform-Sessels mit Arthrodese-Sitzfläche

Wenn die elektrisch verstellbare Fußstütze ausgefahren wird, bewegt sich die Klappe automatisch wieder in die horizontale Position. Nun kann eine Winkelkorrektur mit Hilfe der elektrisch verstellbaren Rückenverstellung erfolgen.

## 5.4 Drehscheibe

Dank der Drehscheibe können Sie den Fitform-Sessel einfach drehen.

### Lieferanweisung Fitform-Sessel mit Drehscheibe

Zur Vermeidung von Transportschäden wird ein Fitform-Sessel mit Drehscheibe auf einer Schutzplatte geliefert. Um ein Verrutschen des Sessels zu verhindern sind über der Drehscheibe zwei Streifen angebracht. Zusätzlich befindet sich der Sessel in einer leichten Aufstehposition, damit eine Drehbewegung vermieden wird. Bevor Sie den Sessel nutzen können, sind folgende Schritte zu befolgen:

- Legen Sie den Sessel vorsichtig auf die Seite (achten Sie auf die Handbedienung)
- Entfernen Sie die Schutzplatte an der Unterseite mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers.
- Zum Schutz des Untergrundes können Sie die mitgelieferten Klebefilze unterhalb der Drehscheibe anbringen. Die richtige Position ist hierbei dort, wo die Lenkräder über die Drehscheibe laufen.



## Nutzung der Drehscheibe

Mit Hilfe der Drehscheibe können Sie den Sessel durch Abstoßen der Füße / Beine vom Boden drehen. Hierbei soll der Sessel nicht mehr als 180 Grad in beide Richtungen gedreht werden (drehen Sie hierfür die Ausbuchtung der Drehscheibe zur rechten Vorderseite des Sessels), da sonst die Gefahr besteht, dass das Netzkabel zwischen die Mechanik geraten kann. (nicht bei Akku)

Wenn der Sessel mit einer Aufstehfunktion ausgerüstet ist, wird die Drehscheibe aus Sicherheitsgründen automatisch gebremst wenn diese Funktion genutzt wird. Wir empfehlen den Sessel nach dem Verlassen in der Aufstehposition zu lassen. So können Sie später erneut bequem Platz nehmen, ohne dass der Sessel wegdreht.




## Wichtiger Hinweis für Modelle mit Aufstehfunktion

Das Kabel des Sessels ist sicher an einem Seitenteil Ihres Sessels festgemacht und kann im Innern des Sessels nicht eingeklemmt werden. Wenn das Kabel jedoch an der Außenseite des Sessels zu viel Raum bekommt und Sie ins Drehen kommen und anschließend die Aufsteh-Funktion benutzen, wäre es möglich, dass das Kabel sich doch noch in der Mechanik festsetzt.

Sorgen Sie dafür, dass der Stecker auf jener Seite in die Steckdose eingesteckt wird, wo das Kabel aus dem Sessel hervortritt. Mit anderen Worten: Kommt das Kabel rechts aus dem Sessel hervor, so sollte das Kabel auch rechts in eine Steckdose eingesteckt werden. Und andersherum.

Sollte dies nicht möglich sein, so ist bitte stets dafür zu sorgen, dass das Kabel außerhalb des Sessels nicht derartig lang ist, dass dieses sich innerhalb der Mechanik verfangen kann.

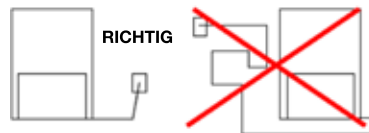

## 5.5 Elektrisch aufblasbare Lendenstütze

Mit Hilfe der elektrisch aufblasbaren Lendenstütze erhält ihr Rücken immer die richtige Unterstützung. Mit Hilfe des Verstellknopfes hinter dem Reißverschluss an der Sesselrückseite können Sie die leere Lendenstütze auch in der Höhe verstellen. (siehe Punkt 4 – Seite 15). Die separate Handbedienung (evtl. in Kombination mit der Option Heizung) für die Steuerung der aufblasbaren Lendenstütze, finden Sie in einer der Seitentaschen.



## 5.6 Hemiplegie-Armlehne

Dank dieser Hemiplegie-Armlehne wird Ihr Arm optimal seitlich unterstützt, so dass Sie besser und gerade im Sessel sitzen können.

### Einstellung der Hemiplegie-Armlehne auf die richtige Tiefe

Es ist wichtig die montierte Hemiplegie-Armlehne auf die richtige Sitztiefe einzustellen. Hierzu lösen Sie die Schraube und Mutter am Schiebeselement der Hemiplegie-Armablage und verschieben diese wunschgemäß in die richtige Position.



### Ingebrauchnahme des Fitform-Sessels mit Hemiplegie-Armlehne

Legen Sie den Arm für eine optimale Unterstützung in die Hemiplegie-Armablage. Die Verstellmöglichkeiten des Sessels sind normal nutzbar. Da die Hemiplegie-Armlehne an der Sitzfläche befestigt ist, bewegt sich diese auch bei Kippung der Sitzfläche und Rückenlehne nach Hinten mit.

## 5.7 Infrarot-Handbedienung

Mit Hilfe der Infrarot-Handbedienung können Sie den Sessel kabellos bedienen.

### Entfernung der Transportsicherung

Damit eine Beschädigung des Infrarot-Empfängers während des Transportes vermieden wird, ist dieser auf der Innenseite des Seitenteiles angebracht.

Vor Gebrauch der Infrarot-Handbedienung muss der Empfänger versetzt werden:

- Legen Sie den Sessel vorsichtig auf die Seite
- An der Innenseite des Seitenteiles (im Sitzen rechts) befindet sich der mit Klettband befestigte Empfänger. Lösen Sie diesen ab.
- Ordnen Sie danach den Empfänger an der Unterseite des Seitenteiles an. Nutzen Sie das dort vorhandene Klettband.



Wenn Sie nun den Netzstecker in die Steckdose einstecken, ist der Sessel funktionsbereit. Je nach Anwendung ist von einer min. einjährigen Lebensdauer der Batterie auszugehen.

Konzipiert für den optimalen Gebrauch in normalen Wohnräumen, bietet dieses System sogar die Möglichkeit mehrere Sessel unabhängig von einander jeweils mit einer Infrarot-Handbedienung auszustatten.

Bei sehr großen Räumen raten wir von einer Infrarot-Handbedienung abzusehen.



## 5.8 Kyphose-Rückenlehne einstellbar

Dank dieser Rückenlehne wird ein kyphosischer Rücken sehr komfortabel unterstützt

### Einstellung der Kyphose-Rückenlehne

Öffnen Sie den Reißverschluss an der Rückseite der Rückenlehne. Lösen Sie danach die Spannbänder mit Hilfe der Klettbänder an der Unterseite. Links und Rechts in der Mechanik befinden sich 2 Schrauben (ca. 30 cm oberhalb der Rückenlehnen-Unterkante). Lösen Sie die beiden Imbus-Schrauben und verstellen Sie den Knickpunkt wunschgemäß. Durch ein Anziehen der Imbus-Schrauben fixieren Sie den Knickpunkt. Darüber angeordnet befindet sich ein zweiter Knickpunkt. Dieses ist die Kopfstütze (Top-Swing). Eine Einstellung erfolgt durch einfaches Bewegen der Kopfstütze nach Vorne bzw. Hinten.

Einige Modelle haben an der Außenseite der Rückenlehne entsprechende Öffnungen, so dass Sie die Imbus-Schrauben des Knickpunktes bequem von dort lösen können.

Der mittlere Abschnitt (vertikal) der Kyphose-Rückenlehne ist mit Hilfe weicherer Schäume deutlich weicher ausgeführt, so dass die Wirbelsäule hier tiefer einsinken kann.



#### Achtung:

Durch den Gebrauch besonders weicher Materialien kann es zu übermäßiger Faltenbildung an der Rückenlehne kommen.

## 5.9 Memory-Funktion

Dank der eingebauten Memory-Funktion können Sie 2 gewünschte Sitzpositionen speichern und später jederzeit durch Knopfdruck auf diese zugreifen.

### Einstellung

Fahren Sie den Sessel in die gewünschte Position.

Wenn Sie diese Position speichern möchten, drücken Sie 2x die blaue Taste „MEM“ (9) und danach die gewünschte blaue Speichertaste 1 oder 2 (Taste 10 oder 11).

Die Position wurde entsprechend gespeichert.

Wenn Sie diese Position abrufen möchten, kann das komfortabel mit Hilfe der blauen Speichertasten 1 oder 2 (Taste 10 oder 11) geschehen. Halten Sie diese so lange gedrückt bis die gewünschte Position erreicht ist.

### Tastenbelegung

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Fußstütze einfahren      | 7. Kopfstütze nach Hinten |
| 2. Fußstütze ausfahren      | 8. Kopfstütze nach Vorne  |
| 3. Aufstehfunktion          | 9. Memory-Funktion        |
| 4. Sitz-Kippung / Kantelung | 10. Speicher-Position 1   |
| 5. Rückenlehne nach Vorne   | 11. Speicher-Position 2   |
| 6. Rückenlehne nach Hinten  |                           |

*(In der abgebildeten Handbedienung sind die Optionen elektrisch aufblasbare Lendenstütze, elektrisch verstellbare Kopfstütze und Heizung integriert)*

### Störungen

Dieser Sessel ist mit Sensoren ausgestattet. Im Fall auftretender Störungen haben Sie die Möglichkeit ein „Reset“ der Motoren durchzuführen.

Das geschieht indem Sie - während Sie eine der gelben Tasten drücken (und dadurch einen Motor laufen lassen) - den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Danach lassen Sie die **gelbe** Taste los. Warten Sie 5 Sekunden. Nun können Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose einstecken. Auf der Handbedienung blinkt nun eine blaue LED Lampe. Drücken Sie nun die blaue Taste „MEM“ (die Motoren starten) und halten diese gedrückt bis alle Motoren wieder gestoppt haben. Das Blinken der blauen LED Lampe erlischt und das „Reset“ des Systems wurde erfolgreich abgeschlossen.



## 5.10 Vario-Rollensystem ersetzt Mobility-Kit Rollensystem

Fitform verfügt innerhalb der Pflege-Kollektion über zwei Rollensysteme: das selbstbremsende Laufrollensystem und das Mobility-Kit Rollensystem. Ab heute wird das Mobility-Kit durch das „Vario-Rollensystem“ ersetzt.

### Handlicher Hebel

Wie bereits beim Mobility-Kit ermöglicht auch das Vario-Rollensystem das einfache Verschieben eines Sessels mit oder ohne Person darin. Der Schiebegriff wurde durch einen praktischen Hebel ersetzt, der abgenommen werden kann. Dies hat den Vorteil, dass kein sichtbarer Griff mehr vorhanden ist, wenn der Sessel nicht bewegt werden muss.



## 5.11 RCPM-Sitzsystem

Mit Hilfe des RCPM-Sitzsystems bleibt Ihr Rücken während des Sitzens in Bewegung und Rückenschmerzen werden gemindert.

### Das RCPM-Sitzsystem

RCPM ist eine kaum wahrnehmbare Drehbewegung. Ca. 4x in der Minute führt die Sitzfläche eine 0,8 Grad Drehbewegung nach Links und Rechts aus. Die Erfolge von RCPM sind nicht nur wissenschaftlich bewiesen, sondern werden von zahlreichen Nutzern ausdrücklich gelobt.



### Bedienung

Das RCPM-Sitzsystem kann an- und ausgeschaltet werden. Hierzu befindet sich ein Schalter in einer der Seitentaschen oder (falls keine Seitentaschen vorhanden sind) hinter dem Reißverschluss an der Rückseite der Rückenlehne. Das System verfügt über einen Gewichts-Sensor und arbeitet nur wenn eine Person im Sessel sitzt. Bei Aktivierung des Systems leuchtet eine rote LED Lampe auf dem Schalter.



### **Achtung:**

Sollte eine Fixierung des Rückens oder des Beckens notwendig sein, raten wir von der Nutzung des RCPM-Sitzsystems ab. Ebenso bei gebrochenen Rückenwirbeln und bei Beckeninstabilität.

## 5.12 Transparente Arbeitsplatte

Mit Hilfe dieser Arbeitsplatte haben Sie die Möglichkeit zu schreiben, einen Laptop zu bedienen oder einfach Speisen oder Getränke abzustellen.



### Gebrauchsfertige Montage

Lösen Sie das Klebeband an der Oberseite des Tisch-Ständers. Dieses dient dazu die Vorrichtung der Höhenverstellung (Stift) beim Transport zu fixieren.

Die aus Plexiglas gefertigte Arbeitsplatte ist bereits mit dem Ständer versehen und liegt eingepackt auf der Sitzfläche des Sessels. Nach dem Auspacken der Platte und des Sessels, kann der Ständer über den Halter geschoben werden.

### Gebrauch der transparenten Arbeitsplatte

Da die Arbeitsplatte auf einem höhenverstellbaren Ständer ruht, können Sie alle Verstellmöglichkeiten des Sessels nutzen, ohne das die Arbeitsplatte droht abzubrechen. Ändern Sie die Position des Metall-Stiftes in der hölzernen Aufnahme im Inneren der Halterung um die Höhe der Arbeitsplatte wunschgemäß einzustellen. Die Arbeitsplatte kann in jede Richtung geschwenkt werden.



#### HINWEIS

Wenn Sie den Sessel in die Aufstehposition fahren wird die Arbeitsplatte mit nach oben gedrückt. Es ist wichtig, dass Sie in diesem Moment nichts auf der Platte abgestellt haben.

## 5.13 Verstellbarer Arbeitstisch

Der verstellbare Arbeitstisch ist in der Höhe und Neigung verstellbar, sowie wegklappbar. Mit Hilfe der eingebauten Gasdruckfeder kann der Tisch durch Eindrücken des seitlichen Knopfes bequem in der Höhe verstellt werden. Die Neigung können Sie mit Hilfe des Knopfes an der anderen Seite der Arbeitsplatte verstellen.



## 5.14 Heizung in Sitz und Rücken

Dank der eingebauten Heizelemente werden Sie einen noch größeren Sitzkomfort erfahren, und das mit stets angenehmen Temperaturen.

Die separate Handbedienung der Heizung (evtl. kombiniert mit der Option einer elektrisch aufblasbaren Lendenstütze) befindet sich in einer der Seitentaschen des Sessels. Heizelemente befinden sich in der Sitzfläche sowie im unteren Rückenbereich und sind nicht sichtbar. Bereits nach wenigen Minuten können Sie die angenehme Wärme genießen.



Durch das Drücken der roten Taste schalten Sie die Heizung an. Die LED Lampe auf der Handbedienung blinkt langsam. Die Heizung läuft nun in der niedrigsten Stufe. Ein erneuter Druck auf die rote Taste erhöht die Stufe. Die LED Lampe blinkt schneller. Ein dritter Druck auf die rote Taste versetzt die Heizung auf die höchste Stufe. Mit einem erneuten Druck auf die rote Taste schalten Sie die Heizung aus.

Anzahl Tastendruck	Temperatur ohne Belastung	ca.Temp. mit Belastung ca.
1x = an - Stufe 1	23 Grad Celsius	30 Grad Celsius
2x = höher - Stufe 2	25 Grad Celsius	32 Grad Celsius
3x = höher - Stufe 3	27 Grad Celsius	34 Grad Celsius
4x = aus		

Die o. g. Temperaturen sind lediglich ca. Richtwerte und können abhängig von dem Bezug und der Füllung des Sessels abweichen.

Nach 20 Minuten schaltet sich die Heizung automatisch aus. Sie können diese jedoch direkt danach erneut einschalten.

## 5.15 Laufrollensystem selbstbremsend

Mit dem Laufrollensystem haben Sie die Möglichkeit den Sessel (nur ohne Person) bequem zu verrollen.

### Inbetriebnahme

Fitform-Sessel mit Rollen an den Kufen (anstatt FüÙe) werden mit sog. TransportfüÙen ausgeliefert. Diese müssen vor Inbetriebnahme entfernt werden. Hierzu legen Sie den Sessel auf die Seite (Achtung: nicht die Seite auf der sich die Handbedienung befindet) und entfernen die beiden schwarzen Kunststoff-FüÙe an den Vorderseiten der Kufen mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers.



### Bevor Sie den Sessel verrollen

- Fahren Sie den Sessel in die Neutralposition
- Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lagern Sie das Kabel evtl. in einer der Seitentaschen

### Das Rollen des Sessels

Hinter dem Reißverschluss an der Rückseite der Rückenlehne befindet sich ein Hebel. Wenn Sie diesen Hebel nach Oben bewegen, erhalten die Rollen Bodenkontakt und der Sessel lässt sich (nur ohne Person!) verrollen. Wenn Sie den Hebel wieder los- bzw. herunterlassen verlieren die Rollen den Bodenkontakt und der Sessel ist automatisch gebremst. Durch diese Wirkungsweise wird ein ungewolltes Wegrollen des Sessels verhindert.



## 5.16 Abklappbares Seitenteil

Das abklappbare Seitenteil erleichtert einen Rollstuhltransfer.

### Inbetriebnahme

Zur Vermeidung von Transportschäden ist das abklappbare Seitenteil mit Transportschrauben gesichert. Diese werden wie Folgt entfernt:

- Fahren Sie das Fußteil vollständig aus.
- Bringen Sie den Sessel in die äußerste Kipp-Position nach Hinten.
- An der Vorderseite des Schutzbleches befinden sich zwei (rot markierte) Schrauben, die durch das Schutzblech in das Seitenteil geschraubt sind. Entfernen Sie diese Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschraubendrehers.



### Ingebrauchnahme des abklappbaren Seitenteiles

Stellen Sie den Rollstuhl so dicht wie möglich an den Sessel heran. Im Sessel sitzend greifen Sie die Vorderseite der Armlehne und ziehen diese so weit wie möglich nach Hinten. Das Seitenteil kann nun nicht mehr nach Vorne fallen, und der Rollstuhltransfer ist nun möglich.



## 6. Häufig gestellte Fragen

### Was mache ich, wenn der Sessel keine Funktion hat / der Sessel nicht reagiert?

- prüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in die **Steckdose** eingesteckt wurde
- prüfen Sie, ob der **Akku** (falls vorhanden) nicht **entladen** ist
- prüfen Sie, ob die „**Tastatursperre**“ auf der Fernbedienung aktiviert wurde

### Wie funktioniert die Tastatursperre?

Um die Tastatursperre zu aktivieren, drücken Sie bitte 10 Sekunden lang die Taste mit dem Schlüsselsymbol (Kabel-Fernbedienung unten links). Der Anzeige-Zustand der LED-Lampe auf der Fernbedienung (Mitte oben) ändert sich entsprechend. Durch erneutes Betätigen der Schlüssel-Taste (ca. 10 Sekunden) wird der Betrieb wieder freigeschaltet.

### Wie verstelle ich die Kopfstütze (Top Swing)?

Zahlreiche Fitform-Sessel sind mit einer **verstellbaren** Kopfstütze (Top Swing) ausgestattet. Hierzu drücken Sie bitte das obere Teil der Rückenlehne (**ca. 30 cm von der Oberkante**) nach vorne oder hinten.

### Wie bediene ich die Lendenstütze?

Fitform-Sessel sind mit einer **verstellbaren** Lendenstütze ausgestattet. Für eine Verstellung öffnen Sie bitte den Reißverschluss an der Sesselrückseite. Hinter diesem **Reißverschluss** befinden sich ein **Drehknopf** sowie eine **Handpumpe**. Lösen Sie den Drehknopf und verschieben Sie die Lendenstütze nach oben oder unten.

Mit Hilfe der Handpumpe können Sie das Luftkissen der Lendenstütze entsprechend aufblasen. Die Handpumpe verfügt über einen **Abluss-Knopf** um das Kissen wieder zu entleeren.

**Achtung: Eine Höhenverstellung der Lendenstütze ist nur im luftleeren Zustand möglich!**

### Wie kann es sein, dass mein Sessel zu wackeln scheint?

Wenn der Sessel höher als in die Normalposition (Ausgangsposition) gefahren wurde, kann der Eindruck entstehen, er würde etwas **wackeln**. Durch ein Herunterfahren in die Normalposition steht er wieder fest.

### Die Fußbank fährt nicht aus?

Alle motorischen Fitform-Sessel sind mit einer **Sicherheitsfunktion** ausgestattet, so dass die Fußbank bei Anwendung der Aufstehfunktion (oberhalb der Normalposition) nicht ausgefahren werden kann. Bitte prüfen Sie daher erst, ob sich der Sessel in Normalposition befindet.

### Der Sessel „stoppt“ während der Rückstellung aus der Aufstehposition?

Wenn Sie den Fitform-Sessel aus der Aufstehposition herunter fahren, stoppt dieser bei dem Erreichen der Normalposition. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Bewegung fortgesetzt.

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Fitform-Fachhändler gerne zur Verfügung!





Ihr Fitform-Händler

**Möbelhandel Narjes**

Aufstehsessel - Pflegesessel - Rehasessel  
Kaisersbusch 1  
D-42781 Haan / Rheinland

Tel.: 02129 1287  
Mobil: 0177 7287656  
E-Mail: [anfrage@pflege-sessel.de](mailto:anfrage@pflege-sessel.de)

Erfahren Sie gleich mehr unter:  
Internet: [www.pflege-sessel.de](http://www.pflege-sessel.de)

Unsere Geschäftszeiten:

Montags bis Freitags von 8:00 bis 19:00 Uhr  
Samstags von 8:00 bis 14:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen ermöglichen wir Ihnen gern einen Besuch in unseren Ausstellungsräumen nach telefonischer Vereinbarung unter der Mobilnummer

0177 728 76 56